

Impact SP B

Ghid de utilizare

Cuprins

Bine ați venit	4
Instrumentele dumneavoastră auditive	5
Tip instrument	5
Familiarizarea cu instrumentele dumneavoastră auditive	5
Componente și nume	6
Comenzi	7
Setări	9
Baterii	11
Dimensiunea bateriei și sfaturi privind manipularea	12
Înlocuirea bateriilor	13
Blocare acces copii (opțional)	15
Utilizare zilnică	18
Pornire și oprire	18
Introducerea și scoaterea instrumentelor auditive	20
Reglarea volumului	21
Schimbarea programului auditiv	22
Blocarea comenzilor (opțional)	23
Reglări suplimentare (opțional)	24

Situații de ascultare speciale	25
Varierea AudioSpot (opțional)	25
La telefon	27
Bucle de inducție audio	29
Intrare audio (sistem FM)	30
Întreținere și îngrijire	34
Instrumente auditive	34
Căști și tuburi	35
Întreținere profesională	35
Informații suplimentare	36
Informații privind siguranța	36
Funcționalitate wireless (fără fir)	36
Accesorii	36
Simboluri utilizate în acest document	37
Identificarea și soluționarea problemelor	37
Informații specifice fiecărei țări	38
Service și garanție	39

Bine ați venit

Vă mulțumim pentru alegerea instrumentelor noastre auditive, care vă vor însoți în viața de zi cu zi. Ca în cazul oricărui lucru nou, va fi necesar un anumit interval de timp să vă familiarizați cu acestea.

Acest ghid, împreună cu asistența oferită de audiologul dumneavoastră, vă va ajuta să înțelegeți avantajele și calitatea mult mai bună a vieții oferite de instrumentele dumneavoastră auditive.

Pentru a beneficia cât mai mult de instrumentele dumneavoastră auditive, se recomandă să le purtați zilnic, pe parcursul întregii zile. Acest ghid vă va ajuta să vă obișnuiți cu acestea.



ATENȚIE

Este important să citiți ghidul de utilizare și manualul de siguranță cu atenție și în întregime. Respectați informațiile de siguranță pentru a evita daunele sau rănirea.

Instrumentele dumneavoastră auditive



Acest ghid de utilizare descrie funcțiile opționale pe care instrumentele dumneavoastră auditive le pot avea sau nu.

Solicitați audiologului să indice funcțiile valide pentru instrumentele dumneavoastră auditive.

Tip instrument

Instrumentele dumneavoastră auditive sunt modele BTE (Behind-The-Ear (În spatele urechii)). Un tub furnizează sunetul de la instrumentul auditiv în ureche.

Instrumentele auditive sunt, de asemenea, adecvate pentru copii cu vârsta sub 3 ani sau persoane cu o vârstă de dezvoltare sub 3 ani.

Familiarizarea cu instrumentele dumneavoastră auditive

Se recomandă să vă familiarizați cu noile instrumente auditive. Cu instrumentele în mână încercați să utilizați comenzile și să observați amplasarea acestora pe instrument. Acest lucru va simplifica sarcina de a simți și apăsa comenzile în timp ce purtați instrumentele auditive.



Dacă întâmpinați probleme la apăsarea comenzilor instrumentelor auditive în timp ce le purtați, puteți solicita audiologului o telecomandă opțională.

Componente și nume





-
- | | |
|----------------------------------|--|
| ❶ Dispozitiv de fixare în ureche | ❷ Indicator de stare LED |
| ❸ Orificii pentru microfon | ❹ Întrerupător rectangular (control) sau capac plat pentru uz pediatric (opțional) |
| ❺ Buton de comandă (control) | ❻ Compartiment baterie (întrerupător de pornire/oprire) |
-

Audiologul dumneavoastră va atașa un tub și o cască particularizată la fiecare instrument auditiv.

Comenzi

Cu ajutorul comenzilor, puteți, de exemplu, regla volumul sau comuta programele auditive. Instrumentele dumneavoastră auditive sunt prevăzute fie cu un buton de comandă și cu un întrerupător rectangular, fie doar cu un buton de comandă.

Audiologul dumneavoastră a programat funcțiile dorite de dumneavoastră comenzilor.

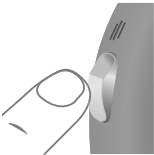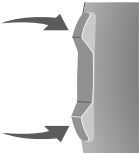Comandă		Stânga	Dreapta
Buton de comandă			
Întrerupător rectangular			



Puteți utiliza, de asemenea, o telecomandă sau o aplicație pe smartphone pentru a vă controla instrumentele auditive.

Funcția întrerupătorului rectangular	L	R
Apăsați scurt:		
Mărire/micșorare volum	☐	☐
Creștere/reducere semnal terapie tinitus	☐	☐
Balans de sunet	☐	☐
Varierea AudioSpot	☐	☐
L = Stânga, R = Dreapta		

Funcție buton de comandă	L	R
Apăsați scurt:		
Schimbare de program	☐	☐
Apăsați lung:		
Standby/pornire	☐	☐
L = Stânga, R = Dreapta		

Funcție buton de comandă și întrerupător rectangular	L	R
Blocarea/deblocarea comenzilor	☐	☐
Citiți mai multe în secțiunea „Blocarea comenzilor”.		
L = Stânga, R = Dreapta		

Setări

Programe auditive

1

2

3

4

5

6

Citiți mai multe în secțiunea
„Schimbarea programului auditiv”.

Funcții

- ☐ **Funcția de pornire cu întârziere** permite introducerea fără țiuit a instrumentelor auditive.
Citiți mai multe în secțiunea „Pornire și oprire”.
- ☐ **AutoPhone™** comută automat la programul telefonic atunci când țineți receptorul telefonului aproape de ureche.
Citiți mai multe în secțiunea „La telefon”.
- ☐ **2earPhone** transmite apelul telefonic în ambele urechi atunci când receptorul telefonului este ținut la una dintre urechi.
Citiți mai multe în secțiunea „La telefon”.

- ☐ **Funcția de terapie tinitus** generează un sunet pentru a vă distrage atenția de la tinitusul dumneavoastră.
- ☐ O **telebobină** este integrată în instrumentul dumneavoastră auditiv pentru a se conecta cu buclele de inducție audio.
Citiți mai multe în secțiunea „Bucle de inducție audio”.
- ☐ Cu **sincronizarea biauriculară** puteți regla simultan ambele instrumente auditive.
Citiți mai multe în secțiunea „Funcționalitate wireless (fără fir)”.

Baterii

Când capacitatea bateriei este redusă, sunetul devine mai slab sau veți auzi un semnal de alarmă. Tipul bateriei determină durata de utilizare a acesteia înainte de fi înlocuită.

Audiologul dumneavoastră poate configura LED-ul să indice starea bateriei. Totuși, instrumentul auditiv trebuie să fie pornit pentru a indica starea:

- Când bateria este plină, LED-ul luminează constant.
- Când bateria este aproape consumată, LED-ul luminează intermitent în mod repetat, aproximativ la fiecare 5 secunde, până la golirea completă a bateriei.
- Când bateria este goală, LED-ul se stinge.



Când compartimentul pentru baterii este blocat, aveți nevoie de o unealtă pentru a-l deschide. Citiți mai multe în secțiunea „Blocarea accesului copiilor”.

Dimensiunea bateriei și sfaturi privind manipularea

Consultați audiologul pentru bateriile recomandate.


Dimensiune baterie: ○ 675

- Utilizați întotdeauna dimensiunea de baterie corectă pentru instrumentele dumneavoastră auditive.
- Scoateți bateriile dacă nu veți utiliza instrumentele auditive în decurs de câteva zile.
- Luați întotdeauna la dumneavoastră baterii de rezervă.
- Înlocuiți imediat bateriile descărcate și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale privind reciclarea.

Înlocuirea bateriilor

Scoaterea bateriei:

- ▶ Deschideți compartimentul pentru baterie.
- ▶ Scoateți bateria.

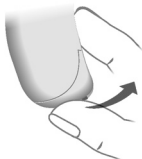

Introducerea bateriei:

- Dacă bateria are o folie de protecție, îndepărtați-o doar când sunteți pregătit/ă să utilizați bateria.



- Glisați bateria în compartiment.

Asigurați-vă că simbolurile „+” indicate pe baterie și compartiment sunt aliniate (consultați imaginea).



Datorită unui magnet aflat în compartiment, bateria se va fixa audibil în poziție.

- Închideți cu atenție compartimentul pentru baterii. Dacă simțiți rezistență, bateria nu este introdusă corect.

Nu încercați să închideți compartimentul pentru baterii cu forță. Se poate deteriora.

Blocare acces copii (opțional)


Instrumentele dumneavoastră auditive pot fi modificate pentru a oferi un compartiment pentru baterii care poate fi blocat, pentru a oferi siguranță în cazul copiilor (blocare acces copii). Funcția de blocare acces copii trebuie activată de către audiologul dumneavoastră.

Cu funcția de blocare acces copii activată, compartimentul pentru baterii va fi blocat automat atunci când este închis. Acest lucru previne, de exemplu, scoaterea și înghițirea bateriei de către un copil.

Pentru a deschide compartimentul pentru baterii blocat, aveți nevoie de un instrument. Instrumentul este inclus la livrarea oricărui set de compartiment pentru baterii cu funcție de blocare a accesului copiilor.

Deschiderea unui compartiment pentru baterii blocat:

- Utilizați instrumentul pentru a împinge bara de blocare albă în partea opusă.
- Țineți-o în loc și în același timp deschideți compartimentul pentru baterii.

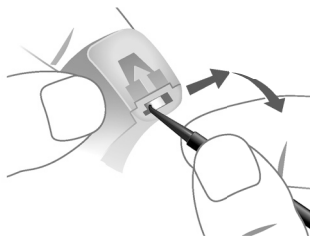

Blocarea/deblocarea compartimentului pentru baterii

i

Pentru a bloca sau debloca compartimentul pentru baterii, aveți nevoie de o unealtă specială. Audiologul dumneavoastră vă va bloca sau debloca compartimentul pentru baterii.

Următoarele instrucțiuni sunt destinate numai audiologului dumneavoastră.

Poziția barei de blocare din compartimentul pentru baterii indică blocarea sau deblocarea acestui compartiment.

Imaginea de mai sus prezintă un compartiment pentru baterii deblocat.

Pentru a-l bloca, audiologul trebuie să îndepărteze componenta evidențiată.


Imaginea de mai jos prezintă un compartiment pentru baterii blocat.

Pentru a-l debloca, audiologul trebuie să instaleze un mecanism de dezactivare a funcției de blocare acces copii.



Blocarea compartimentului pentru baterii:

- ▶ Introduceți vârful uneltei în orificiul mic.
- ▶ Împingeți/deplasați componenta mică din plastic în afara compartimentului pentru baterii.


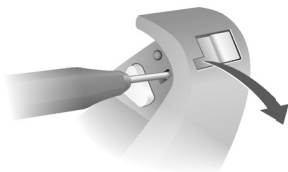


Compartimentul pentru baterii este blocat.

Compartimentul pentru baterii poate fi deblocat din nou de audiologul dumneavoastră.

Deblocarea compartimentului pentru baterii:

- ▶ Împingeți bara de blocare cu mecanismul de dezactivare a funcției de blocare acces copii în partea cealaltă.
- ▶ Asigurați-vă că mecanismul de dezactivare a funcției de blocare acces copii este complet introdus.
- ▶ Rotiți axul pentru a-l desface.

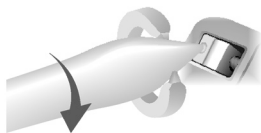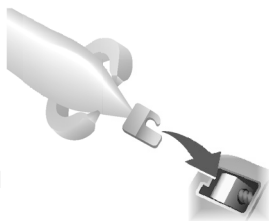

Utilizare zilnică

Pornire și oprire

Aveți următoarele opțiuni de pornire și oprire a instrumentelor dumneavoastră auditive.

De la compartimentul bateriei:

- ▶ Pornire: Închideți compartimentul pentru baterii.
Sunt setate volumul și programul auditiv **implicit**.
- ▶ Opre: Deschideți compartimentul bateriei până la primul limitator.

De la butonul de comandă:

- ▶ Pornire sau oprire: Apăsați butonul de comandă timp de câteva secunde. Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările comenzilor.
După pornire, volumul și programul auditiv utilizate **anterior** rămân setate.

De la telecomandă:

- ▶ Urmați instrucțiunile din ghidul de utilizare a telecomenzii.
După pornire, volumul și programul auditiv utilizate **anterior** rămân setate.

i

- Atunci când purtați instrumentele auditive, un semnal acustic opțional poate indica pornirea sau oprirea unui instrument.
- Audiologul dumneavoastră poate configura LED-ul să lumineze când instrumentul este pornit.
- Scoateți bateriile dacă nu doriți să utilizați instrumentele auditive în decurs de câteva zile.

Când este activată **funcția de pornire cu întârziere**, instrumentele auditive pornesc după o întârziere de câteva secunde. În acest timp, puteți introduce instrumentele auditive în urechi fără a experimenta un țuit de feedback neplăcut.

„Funcția de pornire cu întârziere” poate fi activată de audiologul dumneavoastră.

Introducerea și scoaterea instrumentelor auditive


Instrumentele dumneavoastră auditive au fost reglate cu precizie pentru urechea dreaptă și urechea stângă. Marcatoarele colorate indică partea:

- marcator roșu = urechea dreaptă
- marcator albastru = urechea stângă



Introducerea unui instrument auditiv:

- ▶ Țineți tubul aproape de casă.
- ▶ Împingeți cu grijă casca în canalul urechii ①.
- ▶ Răsuciți-o ușor până când se fixează bine.
- ▶ Ridicați instrumentul auditiv și glisați-l peste partea de sus a urechii ②.

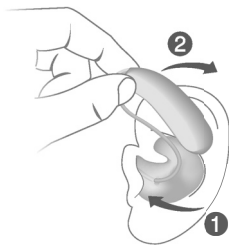


i

- Poate fi util să introduceți instrumentul auditiv din **dreapta** cu mâna **dreaptă** și instrumentul auditiv din **stânga** cu mâna **stângă**.
- Dacă aveți probleme la introducerea căștii, utilizați cealaltă mână pentru a trage ușor de lobul urechii în jos. Astfel, canalul urechii se deschide și casca este introdusă cu ușurință.

Scoaterea unui instrument auditiv:

- Ridicați instrumentul auditiv și glisați-l peste partea de sus a urechii ❶.
- Țineți casca între degetul mare și arătător. Răsuciți cu atenție casca spre înainte în timp ce o trageți afară ❷.

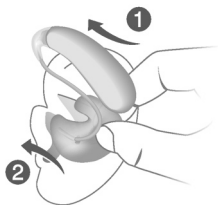

Curățați-vă și uscați-vă instrumentele auditive după utilizare. Citiți mai multe în secțiunea „Întreținere și îngrijire”.

Reglarea volumului

Instrumentele dumneavoastră auditive reglează automat volumul în funcție de situația de ascultare.

- Dacă preferați reglarea manuală a volumului, apăsați scurt întrerupătorul rectangular sau utilizați o telecomandă.

Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările întrerupătorului rectangular.

Un ton de semnal opțional poate indica schimbarea volumului. După atingerea volumului maxim sau minim, puteți auzi un ton de semnal opțional.

Schimbarea programului auditiv

În funcție de situația de ascultare, instrumentele dumneavoastră auditive își reglează automat sunetul.

Instrumentele auditive pot avea, de asemenea, mai multe programe auditive care vă permit să schimbați sunetul, dacă este necesar. Un ton de semnal opțional poate indica schimbarea programului.

În plus, audiologul dumneavoastră poate configura LED-ul să indice schimbarea programului: LED-ul luminează intermitent o dată în cazul în care schimbați la programul 1, de două ori dacă schimbați la programul 2 și așa mai departe.

- Pentru a schimba programul auditiv, apăsați scurt butonul de comandă sau utilizați o telecomandă.

Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările comenzilor. Consultați secțiunea „Setări” pentru o listă a programelor auditive.

i Dacă este activată funcția AutoPhone sau ZearPhone, programul auditiv comută automat la un program telefonic când receptorul telefonului este aproape de ureche.

Citiți mai multe în secțiunea „La telefon”.

i Audiologul dumneavoastră poate configura instrumentele auditive astfel încât să se realizeze automat comutarea la programul contactului glisant audio în cazul în care contactul glisant audio a fost atașat.

Citiți mai multe în secțiunea „Intrarea audio”.

Blocarea comenzilor (opțional)

Comenzile pot fi blocate pentru a preveni orice operare accidentală. Când comenzile sunt blocate, butonul de comandă și întrerupătorul rectangular sunt deblocate.

- Pentru blocarea sau deblocarea comenzilor, apăsați întrerupătorul rectangular și mențineți-l apăsat. În același timp, apăsați butonul de comandă pe același instrument auditiv timp de 3 secunde.

Secțiunea „Comenzi” listează dacă această funcție este configurată pentru instrumentele dumneavoastră auditive.

i

- Dacă purtați două instrumente auditive, trebuie să blocați sau să deblocați comenzile de pe fiecare instrument auditiv, separat.
- Blocarea sau deblocarea pot fi indicate opțional prin iluminarea intermitentă scurtă a LED-ului.
- Când opriți și reporniți instrumentele auditive, funcția de blocare taste rămâne în starea selectată anterior.

Reglări suplimentare (opțional)

De asemenea, comenzile instrumentelor dumneavoastră auditive pot fi utilizate pentru a schimba, de exemplu, balansul sunetului și nivelul semnalului de terapie tinitus. Balansul de sunet vă permite să ajustați sunetele de joasă frecvență și sunetele de înaltă frecvență în funcție de preferințele dumneavoastră.

Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările comenzilor.

Situații de ascultare speciale

Varierea AudioSpot (opțional)

Indiferent dacă doriți să vă concentrați mai mult asupra partenerului dumneavoastră de discuție sau dacă doriți să auziți în general zgomotele din mediul dumneavoastră - cu funcția „Varierea AudioSpot” dispuneți de posibilitatea de a controla modul dumneavoastră de percepție auditivă.

Puteți selecta diferite trepte - de la „AudioSpot în față” (imaginea din stânga), la „reglare mediană” (imaginea din centru) până la „Ascultarea mediului” (imaginea din dreapta).



Condiții preliminare:

- Trebuie să purtați două instrumente auditive.
- Pe unul din instrumentele dvs. auditive trebuie să fie programat comutatorul basculant pentru funcția „Varierea AudioSpot”.

Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările întrerupătorului rectangular.

Cu o aplicație de smartphone adecvată, aveți și mai multe opțiuni de control.

Varierea manuală a AudioSpot:

- ▶ Dacă aveți mai multe programe auditive, schimbați la programul auditiv 1.
- ▶ Apăsați întrerupătorul rectangular setat pentru această funcție.

Nivelul mediu este activ în mod implicit.

- ▶ Apăsați întrerupătorul rectangular superior pentru focalizare mai mare în față sau întrerupătorul rectangular inferior pentru a asculta un mediu mai larg.

Dezactivarea funcției „Varierea AudioSpot“:

- ▶ Comutați la nivelul minim sau maxim.

Un ton de semnal opțional poate indica nivelul minim sau maxim.

- ▶ Comutați încă un pas.

Este declanșat semnalul pentru schimbarea programului auditiv. Acesta indică faptul că ați dezactivat funcția „Varierea AudioSpot“.

La telefon

Când vorbiți la telefon, țineți receptorul telefonului ușor deasupra urechii. Instrumentul auditiv și receptorul telefonului trebuie să fie aliniate. Întoarceți ușor receptorul astfel încât urechea să nu fie complet acoperită.



Program telefonic

Puteți prefera un anumit volum când utilizați telefonul. Solicitați audiologului dumneavoastră să configureze un program telefonic.

- Comutați la programul telefonic de fiecare dată când vorbiți la telefon sau utilizați comutatorul automat de programe.

Secțiunea „Setări” listează dacă un program telefonic sau un comutator automat de programe este configurat pentru instrumentele dumneavoastră auditive.

Comutator automat de programe (AutoPhone sau 2earPhone)

Instrumentul dumneavoastră auditiv poate selecta **automat** programul telefonic atunci când aduceți receptorul telefonului aproape de instrumentul auditiv. 2earPhone poate chiar transmite apelul în ambele urechi. Când ați terminat de vorbit la telefon, îndepărtați receptorul de instrumentul auditiv, iar modul de microfon va fi resetat.

Dacă doriți să utilizați această funcție, solicitați audiologului dumneavoastră următoarele:

- Activarea funcției AutoPhone sau 2earPhone.
- Verificarea câmpului magnetic al receptorului telefonului.

Pentru comutarea automată a programelor, instrumentul dumneavoastră auditiv detectează câmpul magnetic al receptorului telefonului. Nu toate telefoanele produc un câmp magnetic suficient de puternic pentru a activa funcția. În acest caz, puteți utiliza magnetul AutoPhone, disponibil ca accesoriu, și atașați-l la receptorul telefonului.

Consultați ghidul utilizatorului magnetului AutoPhone pentru instrucțiuni privind modul de poziționare a magnetului.



NOTĂ

Utilizați doar magnetul AutoPhone aprobat. Solicitați audiologului dumneavoastră acest accesoriu.

Bucle de inducție audio

Unele telefoane și locuri publice precum teatre oferă semnal audio (muzică și vorbire) prin intermediul buclei de inducție audio. Cu acest sistem, instrumentele dumneavoastră auditive pot primi direct semnalul dorit – fără zgomotul din mediu.

De obicei, puteți recunoaște sistemele cu buclă de inducție audio după anumite simboluri.



Solicitați audiologului dumneavoastră să configureze un program de telebobină.

- Comutați la programul de telebobină de fiecare dată când vă aflați într-o locație cu buclă de inducție audio.

Secțiunea „Setări” listează dacă un program de telebobină este configurat pentru instrumentul dumneavoastră auditiv.

Program de telebobină și telecomandă



NOTĂ

Pentru instrumente cu conectivitate wireless:
Când programul de telebobină este activ,
telecomanda poate cauza un zgomot pulsator.

- Utilizați telecomanda la o distanță mai mare de 10 cm (4 inchi).

Intrare audio (sistem FM)

Cu o intrare audio, vă puteți conecta instrumentele auditive la un sistem FM. Un sistem FM constă dintr-un transmițător și un receptor. Captează sunetele de vorbire la sursa de vorbire (prin intermediul unui microfon separat) și transmite sunetul direct la instrumentele auditive.

Semnalul este mai clar și neafectat de acustica slabă a camerei. Acest lucru poate fi util pentru adulții aflați în situații în care ascultarea este dificilă și pentru copii aflați în săli de clasă.

Majoritatea sistemelor FM permit cuplarea cu dispozitive audio precum un MP3 player.

Note:

- Dacă doriți să folosiți un contact glisant audio, este necesar un compartiment special pentru baterii. Solicitați audiologului dumneavoastră să schimbe compartimentul pentru baterii.
- Solicitați audiologului dumneavoastră să configureze instrumentele auditive, de exemplu:
 - Să regleze combinația dintre semnalul intrării audio cu sunetele din jur.
 - Configurați instrumentele auditive astfel încât să se realizeze automat comutarea la programul contactului glisant audio în cazul în care contactul glisant audio a fost atașat.
- Utilizați numai un contact glisant audio aprobat. Solicitați audiologului dumneavoastră acest accesoriu.



AVERTISMENT


Risc de șoc electric!

- Conectați intrarea audio doar la un dispozitiv care respectă IEC 60065, Norma IEC pentru dispozitive audio, video și alte dispozitive electronice.



NOTĂ

- Țineți strâns de contactul glisant audio atunci când scoateți receptorul FM.

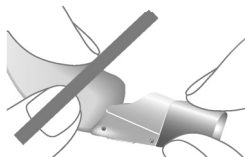


Atașarea contactului glisant audio.

- ▶ Deschideți compartimentul pentru baterii.
- ▶ Trageți capacul.


Forma capacului depinde de tipul de instrument auditiv.



- ▶ Împingeți contactul glisant audio.

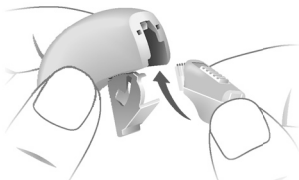

- ▶ Asigurați-vă că se fixează în poziție prin auzirea unei declic.

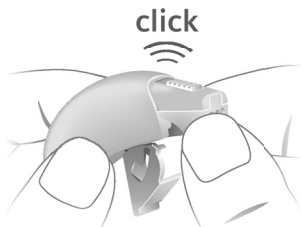


- ▶ Închideți compartimentul pentru baterii.


Detașarea contactului glisant audio.

Când contactul glisant audio nu este atașat, puteți monta un capac pentru a preveni pătrunderea de mizerie și praf în carcasă.

- Deschideți compartimentul pentru baterii.

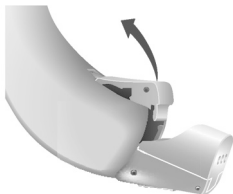

- Deplasați glisorul pe partea din spate a contactului glisant audio și în același timp deplasați în jos contactul glisant audio pentru a-l scoate din dispozitiv.

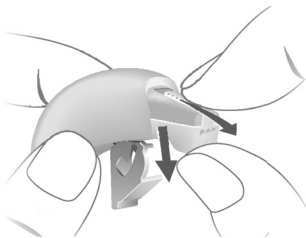

- Împingeți capacul în direcția săgeții.

Forma capacului depinde de tipul de instrument auditiv.



- Închideți compartimentul pentru baterii.

Întreținere și îngrijire

Pentru prevenirea deteriorărilor, este important să aveți grijă de instrumentele dumneavoastră și să respectați câteva reguli de bază, care vor deveni în curând parte a rutinei dumneavoastră zilnice.

Instrumente auditive

Uscarea și depozitarea

- ▶ Uscăți-vă instrumentele auditive peste noapte.
- ▶ În timpul perioadelor lungi de neutilizare, depozitați-vă instrumentele auditive într-un mediu uscat, cu compartimentul bateriei deschis și bateriile scoase.
- ▶ Consultați audiologul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Curățare

Instrumentele dumneavoastră auditive au un strat de protecție. Totuși, dacă acestea nu sunt curățate cu regularitate, se pot defecta sau pot cauza răniri personale.

- ▶ Curățați-vă instrumentele auditive zilnic folosind un șervețel moale și uscat.
- ▶ Nu utilizați niciodată jet de apă sau nu introduceți dispozitivele în apă.
- ▶ Nu aplicați niciodată presiune în timpul curățării.



- Solicitați audiologului dumneavoastră produse de curățare recomandate, seturi speciale de îngrijire sau informații suplimentare privind modul de păstrare a instrumentelor dumneavoastră auditive în bună stare.

Căști și tuburi

Cerumenul (ceara din urechi) se poate acumula pe căști. Acest lucru poate afecta calitatea sunetului. Curățați zilnic căștile.

Solicitați audiologului dumneavoastră să curețe tuburile sau să schimbe căștile și tuburile după cum este necesar.

Curățarea căștilor

- Curățați casca după scoatere cu un tampon moale și uscat.

Acest lucru va împiedica uscarea și întărirea cerumenului.

- Nu utilizați niciodată jet de apă sau nu introduceți casca în apă.

Întreținere profesională

Audiologul dumneavoastră poate efectua întreținerea și curățarea completă profesională a instrumentului.

Căștile și filtrele de ceară particularizate trebuie schimbate atunci când este necesar de către un audiolog.

Solicitați audiologului dumneavoastră recomandări individuale privind intervalele de întreținere, precum și asistență.

Informații suplimentare

Informații privind siguranța

Pentru mai multe informații, consultați manualul de siguranță furnizat cu dispozitivul.

Funcționalitate wireless (fără fir)

Instrumentele dumneavoastră auditive sunt prevăzute cu funcționalitate wireless (fără fir). Aceasta asigură sincronizare între cele două instrumente auditive:

- Dacă modificați volumul sau programul unui instrument, modificările vor fi efectuate automat și la celălalt.
- Ambele instrumente auditive se vor adapta automat și simultan la situația de ascultare.

Funcționalitatea wireless (fără fir) permite utilizarea unei telecomenzi.

Accesorii

Tipul accesoriilor disponibile depinde de tipul instrumentului. Exemplele sunt: o telecomandă, un dispozitiv de flux de date (streaming) audio, sau o aplicație de smartphone pentru telecomandă.

Consultați audiologul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Simboluri utilizate în acest document



Indică o situație care ar putea duce la accidentări grave, moderate sau minore.



Indică posibile daune materiale.



Recomandări și sfaturi despre o mai bună manipulare a dispozitivului dumneavoastră.

Identificarea și soluționarea problemelor

Problema și posibilele soluții

Sunetul este slab.

- Măriți volumul.
- Înlocuiți bateria descărcată.
- Curățați casca.

Instrumentul auditiv emite un sunet fluierat.

- Reintroduceți casca până la fixarea sigură a acesteia.
- Micșorați volumul.
- Curățați casca.

Sunetul este distorsionat.

- Micșorați volumul.
- Înlocuiți bateria descărcată.
- Curățați casca.

Instrumentul auditiv emite tonuri de semnal.

- Înlocuiți bateria descărcată.
-

Problema și posibilele soluții

Instrumentul auditiv nu funcționează.

- Porniți instrumentul auditiv.
 - Închideți complet compartimentul bateriei, cu atenție.
 - Înlocuiți bateria descărcată.
 - Asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
 - Funcția de pornire cu întârziere este activă.
Așteptați câteva secunde și verificați din nou.
-

Consultați-vă audiologul dacă întâmpinați alte probleme.

Informații specifice fiecărei țări

Service și garanție

Numere de serie

Stânga:

Dreapta:

Date de service

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Garanție

Data achiziționării:

Perioadă de garanție în luni:

Audiologul dumneavoastră



WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Danemarca

Document No. 05155-99T01-3B00 RO
Order/Item No. 210 228 14
Master Rev01, 05.2022
© 07.2022, WSAUD A/S. All rights reserved

