

User Instructions

PerfectDry Lux®



PerfectDry Lux®
Dezinfectare UV-C și deumidificare rapidă a aparatelor auditive

- Conținutul pachetului:
- 1 × PerfectDry Lux®
 - 1 × cablu USB
 - 1 × alimentator
 - 1 × manual de utilizare

Informații de identificare
Fișa de date se găsește sub dispozitivul PerfectDry Lux®.

Semnificația abrevierilor
V – Volți (tensiune de alimentare)
A – Amperi (consum de energie)

Simbol alimentare USB

Utilizare exclusiv la interior



Acest produs este realizat din ABS reciclat în proporție de 7%.

Acest produs respectă directivele europene aplicabile.



Eliminare
Eliminați echipamentele vechi într-un mod ecologic.
Dispozitivele vechi sunt fabricate din materiale reciclabile și trebuie eliminate prin intermediul sistemelor corespunzătoare de reciclare.

Date tehnice

Caracteristici

- Dimensiuni externe L × H × A (mm): 92 × 48 × 75
- Dimensiuni interne L × H × A (mm): 70 × 21 × 51
- Greutate (g): 160
- Alimentare: 5 V c.c. / 0,5 A
- Putere maximă: 2,5 W
- Consum în stand-by: < 0,02 W
- Lungime de undă UV-C: 253,7 nm
- Nivel acustic: < 20 dBA
- Temperatură de uscare: 45°C ±3
- Temperatură de funcționare: de la 12°C la 40°C
- Condiții de depozitare: de la -20°C la 65°C
- Versiune software: 01.00
- Lungime cablu USB: 1,5 m

Conector de alimentare

Intrare: 100–247 V c.a. – 50–60 Hz – 0,15 A
Ieșire: 5 V c.c. / 1 A

Descriere

PerfectDry Lux® este un dispozitiv electronic destinat întreținerii și depozitării tuturor tipurilor de aparate auditive. Întreținerea este asigurată prin combinarea unui sistem de uscare cu aer forțat și a dezinfectării cu raze UV-C.

Notă:

– Lampa UV-C este un dezinfectant de suprafață și are o capacitate de penetrare redusă sau inexistentă, ceea ce înseamnă că nu poate deteriora mulajele sau componentele din plastic ale aparatelor auditive.

Dezinfectare UV-C

PerfectDry Lux® este echipat cu o lampă UV-C cu unde scurte, a cărei dispunere circulară la 360° permite atingerea tuturor suprafețelor aparatelor auditive.

Expunerea suprafețelor la lumina UV-C permite distrugerea a 99% dintre fungi și bacterii și reduce semnificativ senzația de mâncărime și infecțiile canalului auditiv. Lampa se va aprinde automat în primele cinci minute ale ciclului de uscare, apoi se va opri automat.

Deumidificare – Uscare

PerfectDry Lux® este echipat cu un sistem de uscare cu aer forțat, care permite reducerea puterii și a timpului necesar ciclului de uscare. Temperatura camerei de uscare este controlată de un sistem electronic pentru a menține o temperatură constantă de 45°C, indiferent de temperatura ambientală din jurul dispozitivului, și pentru a preveni deteriorarea aparatelor auditive.

Instrucțiuni de siguranță

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru utilizări ulterioare.
Orice utilizare care nu este conformă cu aceste instrucțiuni exonerează producătorul de orice responsabilitate.

PerfectDry Lux® trebuie utilizat de o persoană cu capacitate intelectuală deplină. Nu se aplică alte restricții privind utilizatorul.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Orice intervenție, în afara operațiunilor uzuale de curățare și întreținere efectuate de utilizator, trebuie realizată de serviciul de asistență post-vânzare sau de un profesionist autorizat.




Nu introduceți niciodată dispozitivul PerfectDry Lux®, alimentatorul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.
Dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu utilizați dispozitivul. Înlocuiți alimentatorul doar cu unul original.
Nu utilizați detergenți sau produse corozive pentru curățarea dispozitivului PerfectDry Lux®.

Avertisment: orice utilizare care nu respectă aceste instrucțiuni va conduce la anularea garanției.

Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de manipularea incorectă a produsului.

Garanție

PerfectDry Lux® beneficiază de o garanție de 36 de luni de la data achiziției, cu excepția alimentatorului (24 de luni).
În caz de defecțiune sau avarie, contactați specialistul în aparate auditive. Dovada achiziției va fi solicitată de serviciul de asistență post-vânzare pe perioada garanției.
Garanția nu este valabilă în cazul utilizării neconforme cu aceste instrucțiuni, în caz de accident, pătrundere de lichide, neglijență, lipsă de întreținere sau orice altă situație cauzată de utilizator.
De asemenea, garanția nu este valabilă pentru problemele cauzate de descărcări electrice sau variații ale tensiunii electrice. Ca măsură de precauție, se recomandă deconectarea dispozitivului în timpul furtunilor.

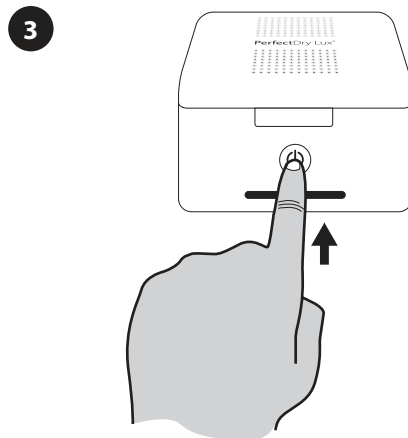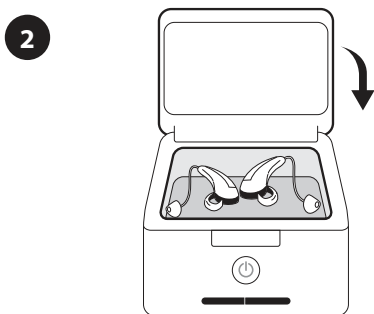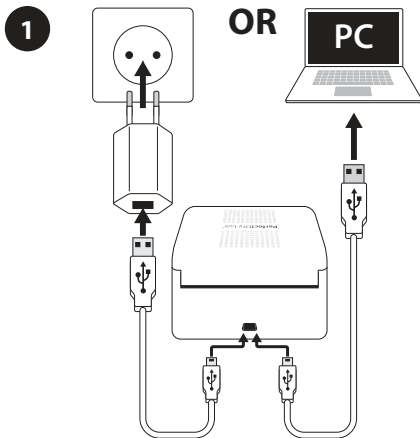

➔ **Touch x1 = Fast cycle**
30 min.



➔ **Touch x2 = Intensive cycle**
1h



(1) Conectați alimentatorul USB la partea din spate a dispozitivului PerfectDry Lux®. Apoi conectați cablul la un port USB sau la o priză electrică. Luminile indicatoare vor clipi, semnalând că dispozitivul este pornit.

(2) Înainte de a introduce aparatele auditive în PerfectDry Lux®, curățați-le și ștergeți-le pentru a îndepărta cerumenul și impuritățile. Dacă este posibil, introduceți aparatele auditive cu compartimentul bateriei deschis, pentru un proces optim de deumidificare. Închideți capacul dispozitivului PerfectDry Lux®.

Precauții de utilizare

- Așezați PerfectDry Lux® pe o suprafață stabilă și uscată.
- Nu priviți direct lampa UV-C aflată în interiorul camerei de uscare.
- Pentru deconectarea dispozitivului de la priză, trageți de ștecher și nu de cablul de alimentare.

Recomandări de întreținere

Curățați dispozitivul cu o lavetă moale.
Nu utilizați produse de curățare puternice sau abrazive pentru curățarea PerfectDry Lux®.
Nu pulverizați lichide în interiorul dispozitivului.
Păstrați capacul închis atunci când dispozitivul nu este utilizat, pentru a evita depunerea impurităților pe lămpile UV-C.


(3) Atingeți butonul de pornire pentru a selecta ciclul de uscare:

- Atingeți o dată pentru a porni ciclul rapid de uscare de 30 de minute; se aprinde lumina din stânga.
- Atingeți de două ori pentru a porni ciclul intensiv de uscare de 1 oră; se aprind ambele lumini.

După un minut fără nicio acțiune, PerfectDry Lux® va intra în modul stand-by, iar luminile se vor stinge. Atingeți o dată butonul de pornire pentru a reactiva dispozitivul, apoi selectați ciclul de uscare dorit.

PerfectDry Lux® se va opri automat la finalul ciclului de uscare, iar luminile indicatoare se vor stinge. Pentru a opri un ciclu de uscare în curs, este suficient să deschideți capacul; dispozitivul se va opri automat (funcție de siguranță).

PerfectDry Lux®

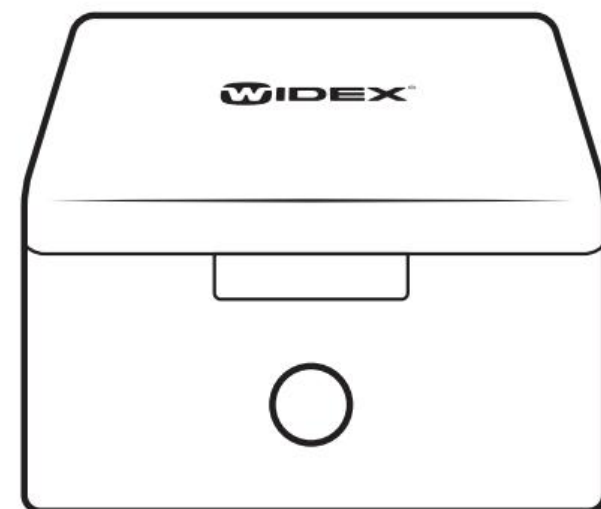

CE

WIDEX[®]

