

## ÎNCĂRCĂTOR PORTABIL WIDEX



## CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Design elegant
- Dimensiuni de buzunar
- Poate fi alimentat de la mai multe surse de alimentare
- După 3 ani de utilizare: min. 3 încărcări pentru 2 aparate auditive

## DESCRIERE

Încărcătorul portabil WIDEX WPP401 este conceput pentru a încărca două aparate auditive WIDEX MRRLD.

Acest încărcător are compartimente individuale de încărcare pentru fiecare aparat auditiv, un compartiment dedicat pentru receptoare și o baterie internă, asigurând o experiență fără probleme.

În fața fiecărui compartiment de încărcare, un LED indică starea de încărcare a aparatului auditiv corespunzător.

Pe partea inferioară a încărcătorului, trei LED-uri indică nivelul de încărcare și starea de încărcare a bateriei interne.

Încărcătorul poate fi conectat permanent la rețeaua electrică sau încărcat fără fir folosind o stație de încărcare fără fir Qi. Poate fi folosit și ca baterie externă pentru încărcarea mobilă a aparatelor auditive.

Sub încărcător, un buton de pornire/oprire vă permite să opriți încărcătorul, în cazul unei depozitări pe termen lung.

## PROPRIETĂȚI

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culoare:                | Negru și platină caldă (metalic)                                                                                      |
| Dimensiuni:             | Înălțime: 60 mm<br>Lățime: 86 mm<br>Adâncime: 32 mm                                                                   |
| Greutate:               | aproximativ 75 g                                                                                                      |
| Condiții de funcționare | Temperatură:<br>Încărcare USB: 10-35 °C (50-95 °F)<br>Încărcare wireless: 10-30 °C (50-86 °F)<br>Umiditate: 20-75% rH |
| Condiții de depozitare  | Temperatură: 10-40 °C (50-104 °F) Umiditate:<br>10-80% rH                                                             |
| Condiții de transport   | Temperatură: -20-60 °C (-4-140 °F)<br>Umiditate: 5-90% rH                                                             |



## ALIMENTARE

|                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrare             | Tip: DC, stabilizat 5V +/- 5% Curent<br>minim: 500 mA Conector USB<br>C<br>Se pot utiliza diferite surse de alimentare (consultați Instrucțiunile de utilizare). Aparatul auditiv se poate încălzi în timpul încărcării |
|                     | Alimentare wireless<br>Suport de încărcare certificat Qi                                                                                                                                                                |
| Baterie încorporată | Capacitate: 650 mAh, autonomie: min. 4 zile în condiții normale de<br>utilizare Timp de încărcare<br>aproximativ 4 ore -<br>USB C aproximativ 6<br>ore - wireless                                                       |

## ELIMINARE

- Nu aruncați încărcătorul (nou sau uzat) împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- Încărcătorul trebuie eliminat ca deșeu electronic sau chimic, în conformitate cu reglementările locale.

1. Capac încărcător
2. Compartiment de încărcare pentru aparatul auditiv stâng
3. Aparatul auditiv drept se încarcă bine
4. Compartiment pentru receptoare
5. Indicatoare luminoase de încărcare a aparatului auditiv
6. Indicator luminos pentru starea bateriei interne
7. Port USB-C
8. Buton de pornire/oprire

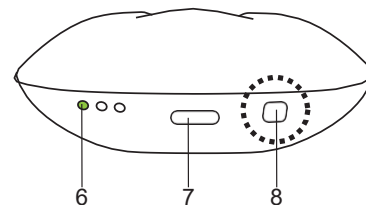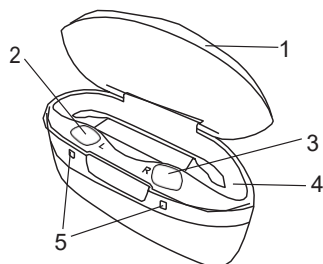

## ÎN CUTIE

În cutia de prezentare veți găsi:

- Un încărcător
- Un adaptor de alimentare
- Un cablu USB
- Instrucțiuni de utilizare