

WIDEX **MOMENT™**

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

GAMA DE PRODUSE WIDEX MOMENT™

Modelul M-CIC-M/M-CIC-M TR
CIC
(Complet intraauricular)



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

APARATUL DUMNEAVOASTRĂ AUDITIV

(De completat de către specialistul ORL)

Orificiu de ven- ☐ scurt

☐ pe întreaga lungime ☐ niciunul

tilație:

Aceasta este o listă de programe posibile pentru aparatul auditiv. Pentru mai multe informații despre utilizarea acestor programe, consultați secțiunea „Programe” din „Personalizare”.

Programele aparatului auditiv:

PROGRAME	AUDIBILITY EXTENDER
☐ Universal	☐
☐ Silențios	☐
☐ Confort	☐
☐ Transport	☐
☐ Urban	☐
☐ Impact	☐
☐ Petrecere	☐
☐ Social	☐
☐ Muzică	☐

PROGRAME SPECIALE**AUDIBILITY EXTENDER**☐ Zen☐ Telefon**PROGRAM DE COMUTARE INTELIGENTĂ****AMPLIFICAREA AUZULUI**☐ Zen+

Denumirile programelor din tabel sunt denumirile predefinite. Dacă ați ales să utilizați alte denumiri disponibile, scrieți noile denumiri în tabel. Astfel veți ști întotdeauna ce programe aveți în aparatele auditive.

NOTĂ

Citiți cu atenție această broșură înainte de a începe să folosiți aparatul auditiv.

NOTĂ

Acest aparat auditiv funcționează fără fir cu aplicația TONELINK. Nu ne asumăm răspunderea dacă aparatul auditiv este utilizat împreună cu oricare altă aplicație terță sau dacă aplicația TONELINK este utilizată împreună cu alte dispozitive incompatibile.

CONȚINUT

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA.....	6
APARATUL DUMNEAVOASTRĂ AUDITIV.....	8
Bine ați venit.....	8
Scurtă prezentare a aparatului dumneavoastră auditiv.....	8
CONDIȚII DE UTILIZARE.....	10
Indicații pentru utilizare.....	10
Domeniul de utilizare.....	10
Condiții de funcționare.....	11
Condiții de depozitare și transport.....	11
UTILIZARE ZILNICĂ.....	12
Pornirea și oprirea aparatului auditiv.....	12
Introducerea și îndepărtarea aparatului auditiv.....	13
BATERIA.....	14
Indicatorul gradului scăzut de încărcare al bateriei.....	14
Schimbarea bateriei.....	14
PERSONALIZARE.....	16
Programe.....	16
Programul Zen (Relaxare).....	18
Schimbarea programelor.....	18
Semnale sonore.....	18

CURĂȚARE.....	19
Instrumente.....	19
Modul de curățare a aparatului auditiv.....	19
Elementul de protecție împotriva cerumenului.....	22
DEPANARE.....	25
INFORMAȚII DE REGLEMENTARE.....	27
Prevederile FCC și ISED.....	27
Informații privind eliminarea.....	29
SIMBOLURI.....	30

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste pagini înainte de a începe să utilizați aparatul auditiv.



Aparatele auditive și bateriile pot fi periculoase dacă sunt ingerate sau utilizate în mod necorespunzător. Ingerarea sau utilizarea necorespunzătoare poate conduce la leziuni severe sau chiar deces. În caz de ingestie, apelați imediat serviciul de urgență sau spitalul local.



Nu purtați aparatele auditive atunci când nu le utilizați. În acest mod, se vor asigura ventilarea conductului auditiv și prevenirea infecțiilor auriculare.



Dacă suspectați că aveți o infecție auriculară sau o reacție alergică, contactați medicul sau specialistul ORL.



Contactați specialistul dvs. ORL dacă simțiți disconfort la purtarea aparatului auditiv sau dacă nu se potrivește în mod adecvat, provocând iritație, înroșire sau alte efecte similare.



Scoateți din ureche aparatele auditive înainte de a face duș, de a înota sau de a utiliza un uscător de păr.



Nu purtați aparatele auditive atunci când aplicați parfum, când utilizați produse pulverizate, geluri, loțiuni sau creme.



Nu uscați aparatul auditiv într-un cuptor cu microunde - îl veți distruge în acest mod.



Nu utilizați niciodată aparatele auditive ale altor persoane și nu permiteți altor persoane să folosească aparatul dvs. deoarece astfel vă puteți deteriora auzul.



Nu utilizați niciodată aparate auditive în medii în care pot exista gaze explozive, ca de exemplu în mine etc.



Nu păstrați aparatele auditive, componentele, accesoriile și bateriile lor la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu dizabilități mintale.



Nu încercați niciodată să deschideți sau să reparați aparatul auditiv pe cont propriu. Contactați specialistul ORL dacă este nevoie ca aparatul dvs. auditiv să fie reparat.



Aparatele dvs. auditive includ tehnologie de radiocomunicații. Țineți întotdeauna cont de mediul în care utilizați aparatul. Dacă se aplică restricții, trebuie să luați măsuri de precauție pentru a le respecta.



Dispozitivul dvs. a fost conceput astfel încât să respecte standardele internaționale de compatibilitate electromagnetică. Cu toate acestea, nu este exclus ca el să provoace interferențe cu alte echipamente electrice. Dacă apar interferențe, păstrați distanța față de alte echipamente electrice.



Nu expuneți aparatele auditive la temperaturi extreme sau la un nivel ridicat de umiditate și uscați-le rapid dacă se udă sau dacă transpirați intens.

APARATUL DUMNEAVOASTRĂ AUDITIV


Bine ați venit

Felicitări pentru noul dumneavoastră aparat auditiv.

Utilizați aparatul auditiv în mod regulat, chiar dacă vă va lua puțin timp să vă acomodați cu acesta. Utilizatorii care nu folosesc aparatul frecvent nu beneficiază complet de pe urma unui astfel de aparat.

Aparatul dumneavoastră auditiv și accesoriiile sale pot arăta diferit față de imaginile din această broșură. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a efectua orice modificări pe care le considerăm necesare.

Scurtă prezentare a aparatului dumneavoastră auditiv

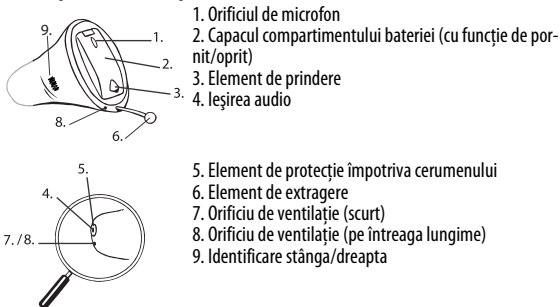

Culoarea de identificare stânga/dreapta vă ajută să identificați corect partea stângă și partea dreaptă. Aparatul auditiv pentru urechea stângă prezintă un marcaj albastru. Aparatul auditiv pentru urechea dreaptă prezintă un marcaj roșu.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Indicații pentru utilizare

Aparatele auditive sunt indicate pentru persoanele cu vârsta mai mare de 36 de luni cu un interval al hipoacuziei care variază de la un nivel minim (10 dB HL) la unul ridicat (90 dB HL) și toate configurațiile de hipoacuzie.

Acestea trebuie programate de specialiști ORL certificați (audiologi, specialiști în domeniul aparatelor auditive, tehncieni audioprotezisti) care sunt instruiți în domeniul (re)abilitării auzului.

Domeniul de utilizare

Aparatele auditive sunt concepute ca niște dispozitive de amplificare a conducției aeriene, care să fie utilizate în situații de ascultare cotidiene. Aparatele auditive pot fi prevăzute cu programul Zen destinat asigurării unui fundal sonor de relaxare (respectiv, sursă de muzică/sunet) pentru persoanele adulte care doresc să asculte astfel de sunete în liniște.

Condiții de funcționare

Aparatul auditiv a fost proiectat să funcționeze în situații cotidiene și funcționează în condiții de mediu care sunt confortabile pentru dvs. Puteți purta aparatul auditiv în timpul zborurilor, dar trebuie să îl scoateți înainte de duș sau înot.

Condițiile specifice de funcționare pentru aparatul auditiv:

	Minimă	Maximă
Temperatură	0°C (32°F)	50°C (122°F)
Umiditate	UR 10%	UR 95%
Presiune atmosferică	750 mbar	1060 mbar

Condiții de depozitare și transport

Aparatul auditiv este sensibil la condiții extreme precum temperaturile ridicate. Acesta nu trebuie să fie depozitat sau transportat la lumina directă a soarelui, ci numai în următoarele condiții.

Condiții specifice de depozitare și transport:

	Minimă	Maximă
Temperatură	-20°C (-4°F)	55°C (131°F)
Umiditate	UR 10%	95% rH

Fișe tehnice și informații suplimentare referitoare la aparatele dvs. auditive sunt disponibile la <https://global.widex.com>.

UTILIZARE ZILNICĂ

Pornirea și oprirea aparatului auditiv



Pentru a porni aparatul auditiv, închideți capacul compartimentului bateriei. Aparatul auditiv va emite un semnal sonor pentru a indica faptul că este activat, cu excepția situației în care specialistul dumneavoastră ORL a dezactivat această funcție.



Deschideți compartimentul bateriei pentru a opri aparatul auditiv.

NOTĂ

Puteți, de asemenea, ține și strânge aparatul auditiv în mână pentru a verifica dacă este activat. Dacă este pornit, acesta generează un sunet ascuțit. Rețineți că trebuie să opriți aparatul auditiv atunci când nu este utilizat.


Introducerea și îndepărtarea aparatului auditiv



Închideți complet capacul compartimentului bateriei. Țineți aparatul auditiv cu degetul mare și degetul arătător și introduceți-l ușor în ureche până resimțiți un anumit grad de rezistență.

Iar, apoi, cu vârful degetului arătător, împingeți ușor aparatul auditiv în ureche până când simțiți că este așezat într-o poziție confortabilă.

Poate fi util să trageți urechea externă spre spate și în sus atunci când introduceți aparatul auditiv.

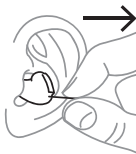

Utilizați cablul de extragere pentru a scoate aparatul auditiv din ureche.

NOTĂ

Dacă extragerea aparatului auditiv este dificilă, deplasați-l cu grijă la stânga și la dreapta în timp ce trageți de cablul de extragere.

BATERIA

Utilizați o baterie **de tip 10 zinc-aer** pentru aparatul dumneavoastră auditiv.

Utilizați întotdeauna o baterie nouă, neutilizată, care este exact tipul de baterie recomandată de specialistul dumneavoastră ORL.

NOTĂ

Asigurați-vă că bateria este complet curată și nu prezintă niciun reziduu înainte de a o introduce în aparatul auditiv. În caz contrar, aparatul auditiv poate să nu funcționeze conform așteptărilor.



Nu încercați niciodată să reîncărcați bateriile aparatelor auditive deoarece acestea pot exploda.



Nu lăsați niciodată în aparatele auditive o baterie plată în timpul depozitării acestora. Poate prezenta scurgeri și deteriora aparatul auditiv.



Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor de pe ambalaj și rețineți data expirării.

Indicatorul gradului scăzut de încărcare al bateriei

Atunci când bateria este plată, se va emite un semnal sonor. În cazul în care bateria se descarcă subit, este posibil să nu existe niciun avertisment în acest sens. Vă recomandăm să purtați cu dumneavoastră o baterie de schimb oriunde ați merge.

Schimbarea bateriei

Pentru a schimba bateria, procedați în felul următor:



Desprindeți folia de protecție de pe noua baterie și asigurați-vă că nu există urme de substanță adezivă pe aceasta. Lăsați-o "sa respire" timp de 60 de secunde.

Utilizați elementul de prindere pentru a deschide ușor ușa compartimentului bateriei și pentru a scoate vechea baterie.

Introduceți noua baterie în compartiment conform indicațiilor. Închideți capacul. Dacă nu se închide cu ușurință, bateria nu este introdusă corect.

În cazul în care nu utilizați aparatul auditiv timp de câteva zile, îndepărtați bateria.

NOTĂ

Preveniți căderea aparatului auditiv - țineți aparatul deasupra unei suprafețe moi atunci când înlocuiți bateria.

PERSONALIZARE

Programe

Aceasta este o prezentare generală a programelor din care puteți selecta. Pentru recomandări, contactați specialistul ORL.

PROGRAME	UTILIZARE
Universal	Pentru utilizare zilnică
Silențios	Program special de ascultare în medii silențioase
Confort	Program special pentru ascultare în medii zgomotoase
Transport	Pentru ascultare în situații cu zgomote ce provin de la autovehicule, trenuri etc.
Impact	Utilizați acest program dacă preferați un sunet clar și precis
Urban	Pentru ascultare în situații în care nivelurile de sunet se schimbă (în supermarketuri, spații de lucru zgomotoase sau alte medii similare)
Petrecere	Pentru ascultare în situații în care mai multe persoane vorbesc în același timp
Social	Utilizați acest program în cazul în care participați la mici evenimente de sociale, cum ar fi o cină în familie

PROGRAME	UTILIZARE
Muzică	Pentru a asculta muzică
PROGRAME SPECIALE	UTILIZARE
Zen	Redă tonuri sau sunete pentru un mediu sonor relaxant
Telefon	Acest program este destinat ascultării conversațiilor telefonice
PROGRAME DE COMUTARE INTELIGENTĂ	UTILIZARE
Zen+	Acest program este similar cu programul Zen, însă vă permite să ascultați tipuri diferite de tonuri sau zgomote

NOTĂ

Denumirile din lista de programe sunt denumirile implicite. Specialistul dumneavoastră ORL poate, de asemenea, să selecteze o denumire de program alternativă dintr-o listă preselectată. Apoi vă va fi și mai facil să selectați programul potrivit în fiecare situație de ascultare.

În funcție de tipul dvs. de hipoacuzie, specialistul ORL poate activa funcția de îmbunătățire a audibilității. Întrebați specialistul ORL dacă puteți beneficia de pe urma acesteia.

Dacă nevoile și preferințele dumneavoastră se schimbă în timp, specialistul dumneavoastră ORL vă poate modifica ușor programele selectate.

Programul Zen (Relaxare)

Aparatul dumneavoastră auditiv poate fi prevăzut cu un program unic de ascultare opțional ce poartă denumirea de Zen (Relaxare). Acesta generează tonuri muzicale (și uneori și un zgomot de scurtă durată) pe fundal.



Dacă percepeți o scădere a volumului sau a toleranței sunetelor, dacă nu mai auziți cuvintele la fel de clar sau dacă tinitusul se agravează, contactați specialistul dumneavoastră ORL.



Utilizarea programului Zen (Relaxare) poate interfera cu auzul sunetelor cotidiene, inclusiv al vorbirii. Acesta nu trebuie utilizat atunci când este important să puteți auzi aceste sunete. Comutați aparatul auditiv la un alt program diferit de Zen (Relaxare) în astfel de situații.

Schimbarea programelor

De asemenea, puteți folosi aplicația ToneLink pentru a schimba programele și pentru a ajusta sunetul în aparatele auditive.

Semnale sonore


Aparatul dumneavoastră auditiv emite anumite sunete pentru a vă informa că anumite funcții au fost activate sau că ați schimbat programul. Aceste sunete pot fi mesaje vorbite sau semnale sonore.

Rugați specialistul dumneavoastră ORL să dezactiveze aceste sunete dacă nu aveți nevoie de ele.

CURĂȚARE

Instrumente

Veți primi următoarele instrumente de curățare împreună cu aparatul auditiv:

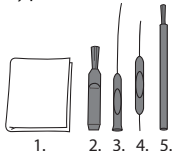

1. Lavetă
2. Perie
3. Instrument lung de eliminare a cerumenului
4. Instrument scurt de eliminare a cerumenului
5. Magnet pentru baterie

Modul de curățare a aparatului auditiv

Curățarea zilnică a aparatului dumneavoastră auditiv îl va face mai eficient și mai confortabil la purtat.

Aparatul auditiv



Ștergeți-l cu o lavetă moale (de exemplu, laveta pe care ați primit-o de la specialistul ORL).

Ieșirea audio




Îndepărtați cerumenul vizibil **din jurul** deschiderii ieșirii audio cu periuța sau cu laveta.

Nu încercați să curățați elementul de protecție împotriva cerumenului.

NOTĂ

Dacă nu puteți curăța ieșirea audio, contactați specialistul ORL. **Nu introduceți nicio-dată** nimic în ieșirea audio, deoarece această acțiune poate deteriora aparatul dvs. auditiv.

Deschiderile microfonului

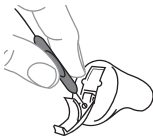


Deschideți capacul compartimentului bateriei și întoarceți aparatul auditiv astfel încât capacul să fie îndreptat în jos (vedeți ilustrația). Ghidați instrumentul scurt de eliminare a cerumenului (nr. 4) prin deschiderile microfonului de pe capac din partea interioară (vedeți imaginile).

NOTĂ

În cazul în care suspectați că în microfonul aparatului auditiv a pătruns cerumen sau murdărie, contactați specialistul ORL. **Nu** introduceți nimic în microfon.

Orificiul de ventilație

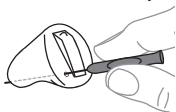

Orificiu de ventilație scurt: curățați cerumenul de pe orificiul de ventilație până la capătul cursei capătului lung al instrumentului de eliminare a cerumenului (nr. 4).

Orificiu de ventilație lung: curățați cerumenul de pe orificiul de ventilație trecând instrumentul lung de eliminare a cerumenului (nr. 3) prin întregul orificiu. Când nu este în uz, lăsați aparatul auditiv deschis pentru a-l ventila.

NOTĂ

Pentru performanțele aparatului dumneavoastră auditiv, este important să mențineți orificiul de ventilație curat, fără cerumen, murdărie sau impurități similare. Curățați-l în fiecare zi după ce l-ați utilizat și adresați-vă specialistului ORL dacă orificiul de ventilație este blocat.

Uscați rapid aparatul auditiv dacă acesta se udă sau dacă transpirați intens. Unele persoane utilizează un dezumidicator special precum Widex PerfectDry Lux pentru a-și menține aparatele auditive uscate și curate. Întrebați specialistul ORL dacă acesta este potrivit pentru dumneavoastră.



Nu utilizați niciun tip de lichid sau dezinfectant pentru a vă curăța aparatul auditiv.



Curățați și inspectați aparatul auditiv în fiecare zi după utilizare pentru a verifica dacă nu este deteriorat. Dacă aparatul auditiv se sparge în timp ce îl purtați, lăsând fragmente mici în conductul auditiv, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu încercați niciodată să scoateți singur(ă) fragmentele.


Elementul de protecție împotriva cerumenului

Elementul de protecție împotriva cerumenului ajută la protejarea aparatului auditiv împotriva cerumenului. Utilizați întotdeauna elementele de protecție împotriva cerumenului furnizate de Widex împreună cu aparatul dvs. auditiv.

Schimbarea elementului de protecție împotriva cerumenului




Deschideți cutia elementului de protecție împotriva cerumenului așa cum se vede în imagine.

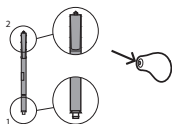


Elementul de protecție împotriva cerumenului prezintă următoarele componente:


1. Cârlig de eliminare
2. Element nou de protecție împotriva cerumenului

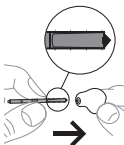



Introduceți cârligul de eliminare în elementul vechi de protecție împotriva cerumenului.

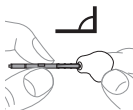


Mențineți suportul într-un unghi corespunzător.

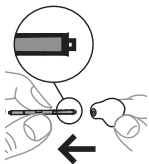

Extrageți dintr-o singură mișcare elementul vechi de protecție împotriva cerumenului.

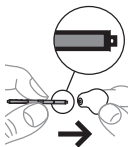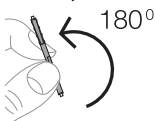

Introduceți noul element de protecție împotriva cerumenului în orificiul ieșirii audio și apăsați-l ușor.

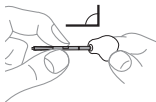

Extrageți suportul dintr-o singură mișcare.



Întrebați specialistul ORL cât de des ar trebui să înlocuiți elementul de protecție împotriva cerumenului.



Elementul de protecție împotriva cerumenului este exclusiv de unică folosință și nu trebuie să fie curățat.



Dacă elementul de protecție împotriva cerumenului nu este prins ferm, îndepărtați-l și utilizați altul nou.



Dacă elementul de protecție împotriva cerumenului se desprinde, rămânând în urechea dumneavoastră, adresați-vă medicului sau specialistului ORL pentru a-l elimina. NU încercați să îndepărtați elementul de protecție împotriva cerumenului fără ajutorul unui specialist.

DEPANARE

Aceste pagini conțin recomandări referitoare la cum trebuie să procedați dacă aparatul dumneavoastră auditiv nu mai funcționează sau dacă nu funcționează conform așteptărilor. Dacă problema persistă, contactați specialistul ORL.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul auditiv nu emite sunete	Nu este pornit	Asigurați-vă că bateria este poziționată corect și că este închis complet capacul compartimentului bateriei.
	Bateria nu funcționează	Introduceți o nouă baterie în aparatul auditiv
	Ieșirea audio este blocată	Consultați secțiunea privind curățarea
	Deschiderea microfonului este blocată	Consultați secțiunea privind curățarea
Volumul aparatului auditiv este prea scăzut	Ieșirea audio este blocată	Consultați secțiunea privind curățarea
	Urechea este blocată de cerumen	Adresați-vă medicului
	Este posibil ca auzul dumneavoastră să fi suferit modificări	Contactați specialistul ORL/medicul

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul auditiv generează încontinuu un sunet ascuțit	Urechea este blocată de cerumen	Adresați-vă medicului
	Nu este plasat corect în conductul auditiv	Extrageți și inserați-l din nou
	Nu este plasat fix în conductul auditiv	Contactați specialistul ORL
Aparatul auditiv nu este confortabil	Nu este plasat corect în conductul auditiv.	Adresați-vă specialistului ORL
	Aparatul auditiv nu este poziționat corespunzător în ureche	Contactați specialistul ORL
	Urechea externă sau conductul auditiv este inflamată/inflamat	Este important ca utilizatorii care folosesc prima dată aparatul auditiv să poarte aparatul auditiv numai pe perioade scurte de timp, la început. Rezervați-vă 2-3 săptămâni pentru a vă familiariza treptat cu aparatul auditiv. Dacă inflamația persistă, contactați specialistul ORL.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Prevederile FCC și ISED

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex A/S could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Statement / Déclaration d'ISED

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



N26346

Informații privind eliminarea

Nu eliminați aparatele auditive, accesoriile și bateriile acestora împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Aparatele auditive, accesoriile și bateriile acestora trebuie să fie eliminate în locuri special amenajate pentru deșeuri electrice și electronice sau înmânate specialistului ORL, pentru eliminare în condiții de siguranță.

SIMBOLURI

Simboluri utilizate de obicei de către Widex A/S la etichetarea dispozitivelor medicale (etichete/instrucțiuni de utilizare/etc.)

Simbol	Titlu/Descriere
--------	-----------------



Producător

Produsul este realizat de către producătorul ale cărui nume și adresă sunt specificate lângă simbol. Dacă este cazul, poate fi specificată și data fabricației.



Număr de catalog

Numărul de catalog (articol) al produsului.



Consultați instrucțiunile de utilizare

Instrucțiunile de utilizare conțin informații importante de siguranță (avertismente/măsuri de precauție), iar acestea trebuie citite înainte de utilizarea produsului.



Avertisment

Textul marcat cu un simbol de avertisment trebuie citit înainte de utilizarea produsului.



Marcajul WEEE

„Nu se elimină ca deșeuri menajere”. Atunci când trebuie eliminat un produs, trebuie să fie trimis la un centru de colectare desemnat în acest sens pentru reciclare și recuperare pentru a preveni riscul de efecte nocive asupra mediului sau sănătății umane ca urmare a prezenței substanțelor periculoase.

Simbol	Titlu/Descriere
	Marcajul CE Produsul corespunde cerințelor prevăzute de directivele europene privind marcul CE.
	Marcajul RCM Produsul corespunde cerințelor de reglementare privind siguranța electrică, compatibilitatea electromagnetică (EMC) și spectrul de frecvențe radio pentru produsele furnizate pe piețele din Australia sau Noua Zeelandă.



Widex A/S

Nymoellevvej 6, DK-3540 Lynge, Danemarca
<https://global.widex.com>



Nr. manual:
9 514 0578 033 01
Ediție:
2021-02

